

# Fermavisc® Gel sine

---

**OMNIVISION**

---

## *Medizinprodukt*

### **Zusammensetzung**

1 ml enthält: 3 mg Hyaluronsäure als Natriumsalz, Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

### **Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten**

Befeuchtung und Benetzung des Auges und der Kontaktlinsen beim Einsetzen und beim Tragen.

### **Dosierung/Anwendung**

Ein-Dosis-Behältnis vom Riegel abtrennen. Zum Öffnen das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses abdrehen (nicht ziehen).

Ein oder zwei Tropfen in jedes Auge geben. Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.

### **Kontraindikationen**

Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln in das Auge eintropfen.

Nicht an infizierten Augen anwenden.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen**

Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.

### **Eigenschaften/Wirkungen**

Fermavisc Gel sine ist ein steriler, konservierungsmittelfreier, viskoelastischer, hochviskoser Schutzfilm für die Hornhaut. Es besteht ausschliesslich aus natürlichen, biologischen Substanzen. Fermavisc Gel sine schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig. Dadurch bewirkt es lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden im Zusammenhang mit mechanischer Beanspruchung (z.B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge), bei Umweltstress (z.B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch) oder bei Sehstress durch intensives Sehen (z.B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten).

### **Sonstige Hinweise**

#### *Lagerung*

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen.

Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfalldatums.

Chargennummer und Verfalldatum sind auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.

#### *Hinweise für die Handhabung*

Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.

Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt, da Fermavisc Gel sine keine Konservierungsmittel enthält, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.

Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt mit der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vermeiden.

### **Zulassungsinhaberin**

Omnivision AG, 8212 Neuhausen.

### **Stand der Information**

Juni 2006.